

DESTRUCTOR - INCINERADOR DE AGUJAS


Needle
INCINERATOR

LED INDICADOR DE CARGA

ENTRADA DE AGUJAS

DEPÓSITO DE RESIDUOS

PULSADOR COMPROBACION DE CARGA

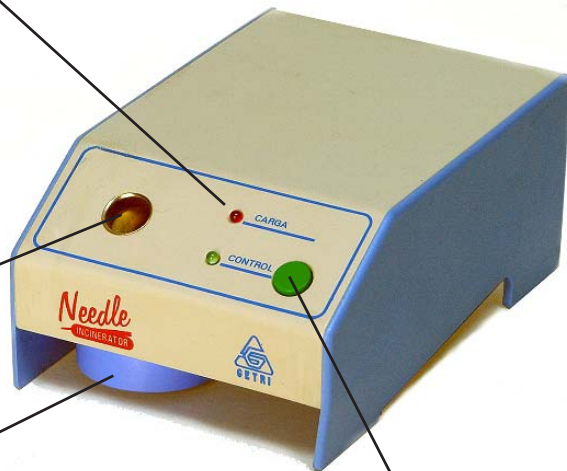

IMPORTANTE: Antes de utilizar el aparato por primera vez, colocar en carga (enchufarlo a la red) durante 18 a 24 horas.

No INCINERAR MÁS DE TRES AGUJAS POR MINUTO

GETRI

Luis I, 71 - Nave 29 - 28031 - MADRID (ESPAÑA)
Tel. +34 91 385 4234 - Fax +34 91 331 2277

Una vez utilizada la aguja, introducirla lentamente en el orificio frontal, **girando ¼ de vuelta a izquierda y derecha**, tal como se ilustra en la imagen, hasta su total incineración. En este momento puede producir un olor dependiendo del residuo que quede en la aguja (sangre, antibiótico, etc.).



Cuando se conecta el aparato a la red, enciende el Led Amarillo, indicador de carga.

Para una mayor duración de la batería y **pleno rendimiento del aparato**, es conveniente utilizarlo conectado a la red y **evitar el agotamiento total** entre cargas.

Con plena carga, tiene autonomía suficiente para incinerar más de 25 agujas sin conectar a la red.

Si al pulsar el botón (**no estando conectado a la red**) no enciende el led verde o lo hace con baja luminosidad, indica falta de carga (en estos casos la aguja no quedará totalmente incinerada).

Los residuos pueden eliminarse periódicamente, retirando la tapa inferior (a rosca).

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CAPACIDAD DE INCINERACIÓN:

Agujas de 30G (0,3 mm Ø) hasta 20G (0,9 mm Ø)

MEDIDAS: 13 X 8,5 X 5 cm.

PESO: 400 gs

CONTROLES LUMINOSOS DE CARGA Y CHEQUEO DE CARGA.

BATERÍA RECARGABLE DE BAJO VOLTAJE Y ALTA INTENSIDAD.

AUTONOMÍA PARA INCINERAR MÁS DE 25 AGUJAS ANTES DE NECESITAR RECARGAR.

CONEXIÓN A 220 V (ó 110 V) 50/60 Hz PARA USO CONTINUO Y CARGA.

CONECTADO A RED, NO TIENE LIMITACIÓN DE USO.

Consumo: 1W Clase I

El fabricante declara que suministrará, bajo petición, diagrama de circuito y lista de componentes